

Instrucciones de limpieza con algodón

gasa de VetNostic Laboratorios®

A MEMBER OF GENESI BIOTECHNOLOGY GROUP



1. Abra la manga de algodón específico para el animal que se está analizando (Levante no más de la mitad).



2. Usando un algodón a la vez, gire, mientras lo frota con firmeza, contra la mejilla interior del animal durante 15 segundos aproximadamente. Elija un área diferente de la mejilla interna con los otros dos algodones restantes.



3. Deje que el aire seque los tres algodones durante al menos 10 minutos. **NO SOPLE EL ALGODÓN.**



4. Coloque los tres algodones de nuevo en su manga original del envase, selle la manga con una cinta o una grapa, después, coloque los algodones dentro de una bolsa de plástico provista. El sello **NO** debe estar herméticamente cerrado. Un algodón mojado en una manga hermética cerrada puede hacer crecer bacterias y destruir la muestra.



5. Si la información de la muestra no ha sido entrada, o si algún cambio se tiene que hacer, complete la etiqueta en la manga del envase.



6. Coloque la bolsa de plástico con los algodones en el sobre estampado con su dirección y correo.

Notas: No use el algodón por lo menos 30 minutos después de comer.

No use algodón a los cachorros de crianza, tendrán las células de la madre en la boca.

Contáctenos al 877-255-9208 • www.vetnostic.com